



# Monitoramento e rastreabilidade de processos

## Etiquetadora Manual Printex<sup>®</sup> 3 Medica - EP3-2928

Etiquetadora Manual com três linhas de impressão, 11 ou 14 dígitos numéricos. Indicada para identificação do pacote e rastreabilidade do processo de esterilização.

### Instruções de Uso


1. Abrir a tampa do compartimento superior;
2. Inserir o rolo de etiquetas na etiquetadora;
3. Encaixar o rolo de fita com a tira virada para o lado do visor;
4. Puxar as duas travas laterais para abrir o compartimento inferior;
5. Passar a tira da fita por dentro da etiquetadora e puxar para fora mais ou menos 15 cm;
6. Fechar o compartimento posterior e frontal empurrando-o contra a etiquetadora até o travamento;
7. Inserir a tira de etiqueta que ficou para fora no espaço entre a roldana metálica e a plástica;
8. Apertar o gatilho da etiquetadora para que a fita seja puxada, a fita deve sair na parte de trás da etiquetadora.



## Etiquetas



Etiqueta de identificação com duplo adesivo, com indicador tipo 1 para esterilização por VAPOR

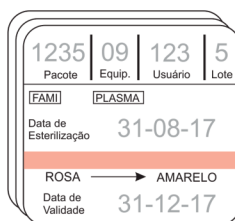

Etiqueta de identificação com duplo adesivo, indicador tipo 1 para esterilização por PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

**As etiquetas são utilizadas para identificar os pacotes e indicar que o produto foi submetido a um processo de esterilização possibilitando a rastreabilidade nos casos de eventos adversos.**

Possuem espaços para as informações: produto, número do lote, data da esterilização, data limite de uso, método de esterilização, responsável pelo preparo.

Dimensões 29 x 28 mm, 500 etiquetas por rolo.